

Visiere con cinturino regolabile.  
Per la protezione di naso e occhi, atossiche e sicure contro il contagio diretto.

- Polietilene tereftalato e poliestere
- Prodotto made in Italy
- Su richiesta personalizzabili con il proprio logo
- Disponibili in confezioni da 10pz



## Visiera integrale Idra

### Descrizione prodotto

La visiera Idra si compone di una protezione anteriore in Pet da 175 micron perfettamente trasparente pulibile con alcool per il riutilizzo, un cinturino regolabile in poliestere e dei giunti in plastica che permettono la regolazione dell'inclinazione.

Il cinturino è regolabile in base alla circonferenza cranica, tramite incastro, senza il rischio di sgancio, dai 55 ai 64 cm.

La visiera Idra protegge da schizzi di liquidi e da corpi solidi. Copre l'intero volto da sopra la fronte a sotto il mento

### Caratteristiche della visiera

La visiera Idra essendo prima di fori protegge da polvere e schizzi.

### Istruzioni d'uso

È importante indossare e smaltire la visiera in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione e diffusione del Virus, per gli agenti patogeni che potrebbero essere presenti su di essa.

È fondamentale che prima di aprire la confezione ed ogni qual volta venga toccata la visiera, si proceda con un adeguato lavaggio delle mani.

Per indossarla correttamente, lavarsi le mani, aprire la confezione e sistemare la visiera sul capo; agganciare il cinturino.

Per rimuoverla, lavarsi le mani e maneggiarla solo dai giunti in plastica neri, mai dalla parte in tessuto. Gettare infine la visiera all'interno della raccolta indifferenziata e non disperderla mai nell'ambiente.

**Quando indossarla:** da utilizzare come indicazioni da normativa vigente.

**Tempo di utilizzo:** può essere disinfettata per il riutilizzo quotidiano, deve essere sostituita se danneggiata.

